
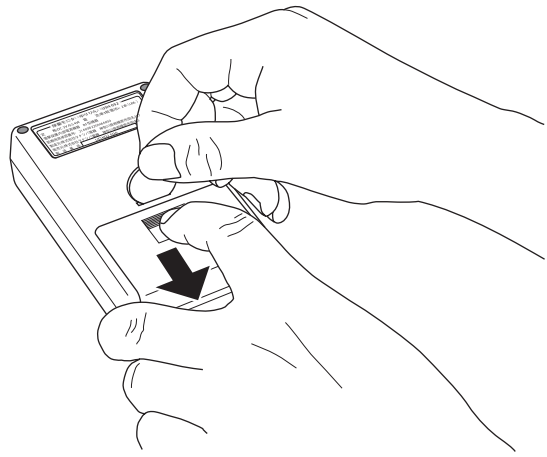


ご使用の手引き


残尿測定は排尿後に行います。

1 電池を入れる (電池を交換する)

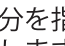


電池カバーをはずします。
電池カバーを100円硬貨を電池カバー開閉溝に強めに押し込みながら、電池カバーの  部分を指で手前にスライドさせて外します。

電池の+を確認し、入れます (交換します)。

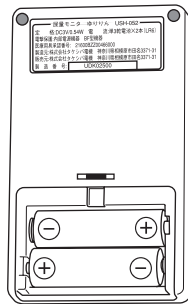



8 残尿測定を終了する

残尿測定を終了する場合、決定ボタンを押すと電源が切れ、測定を終了します。

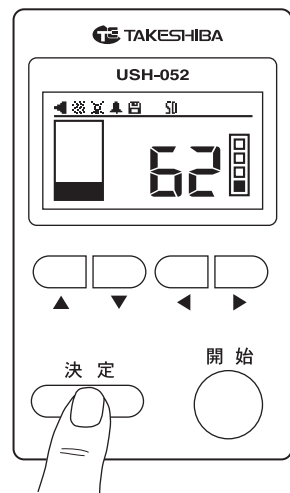


2 プローブを接続する

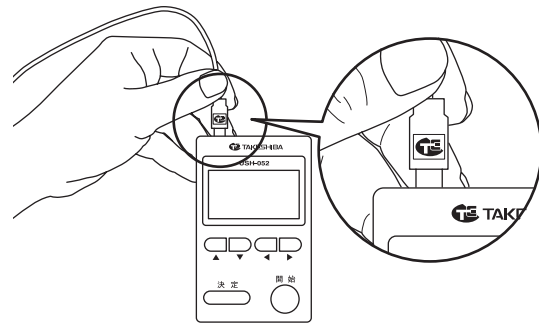


プラグを本体の差込口に差込みます。
 マークのある方を上側 (イラストでは手前側) にして差し込みます。

3 恥骨の位置を確認する

手をそろえて、へその少し下を軽く押します。軽く押したまま、少しずつ手を陰毛部周辺まで下に下げていき、硬いものを感じるところが恥骨です。

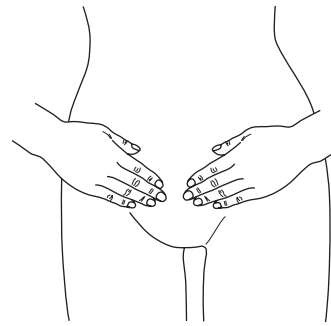


4 ジェルを塗る

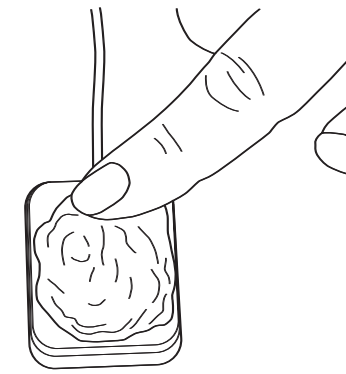

プローブのラベルの貼っていない面にジェルを平に塗り広げます。

5 プローブを測定位置に押し当てる

体の中心で恥骨の直上部にプローブを押し当ててください。

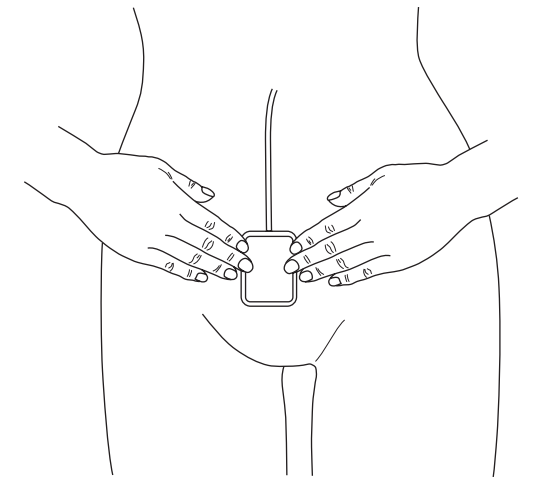

長時間尿動態データレコーダ

ゆりりん

USH-052


測定姿勢



仰臥位 (仰向けに寝た状態)

恥骨直上部より

男性 1.0cm 上
女性 0.5cm 上

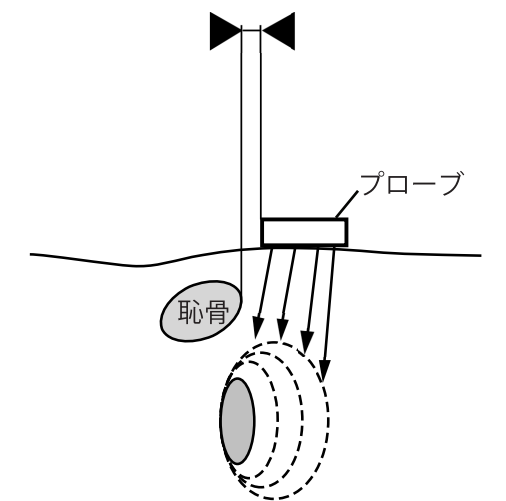


お腹が出ている方は、プローブの上部を体と平行になる様に測定して下さい。

◆ 残尿測定編 ◆


7 残尿を確認する

残尿の有無を確認します。表示部に現在の推定尿量値が表示されます。

残尿が無い場合
「0」と表示部に表示します。

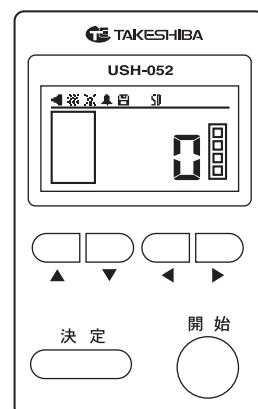

残尿が有る場合
推定尿量値を表示部に表示します。

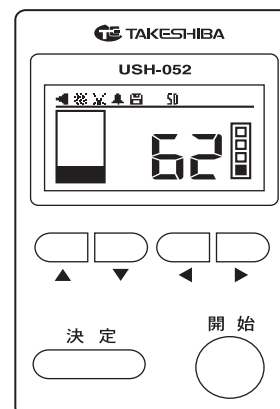


再び開始ボタンを押すと残尿測定が開始されます。

6 電源を入れる

開始ボタンを押して電源を入れます。

選択画面で「残尿測定」を選びます。

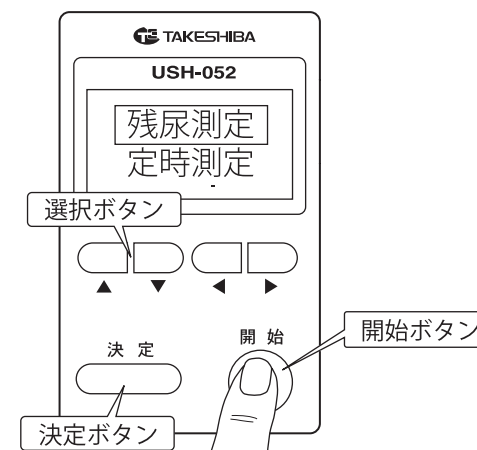

再び開始ボタンを押すと残尿測定が開始されます。

 株式会社 タケシバ電機

お問い合わせ  0120-330-405
FAX 042-776-0656
E-mail support@yuririn.jp